

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

HemaGel®

Zdravotnický prostředek



ÚČEL POUŽITÍ:

Hydrofilní gel k ošetření povrchových poranění kůže.

PROČ POUŽÍVAT HemaGel® K OŠETŘENÍ RAN?

- chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají v průběhu procesu hojení ran
- kryje ránu před sekundární infekcí z venčí
- utváří na ráně pružnou mechanickou ochrannou vrstvu
- vytváří vhodné prostředí pro granulaci včetně snižování sekrece

SLOŽENÍ:

HemaGel® je hydrofilní gel složený z kopolymeru 2-hydroxyethylmetakrylátu obsahujícího polymerně vázané stericky stíněné aminy (HEMA-HAS), makrogolu a čištěné vody (aqua purificata). **HemaGel®** je vyvinutý Ústavem Makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

JAK POSTUPOVAT PŘI POUŽITÍ GELU:

- Očistíte ránu od mechanických nečistot, např. částecek prachu, zbytků předchozích léčebných materiálů, které by mohly následně dráždit a poškozovat ránu.
- Rozetřete tenkou vrstvu gelu (cca 1 mm) po celé ploše spodiny rány s mírným přesahem na zdravou pokožku. Gel přilne na spodinu rány a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.
- Ránu překryjte nesavým materiálem (např. mastným tylem dostupným v lékárně) a následně fixujte obinadlem nebo gázovým čtvercem a náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářkovou náplastí.
- Účinek gelu se projevuje bobtnáním. Unikátní technologie gelu zabraňuje přilepení k ráně a tím umožňuje i velmi snadné odstranění bez bolesti jemným setřením nebo opláchnutím.
- Převaz provádějte dle potřeby po 12 - 48 hodinách, vždy dle stavu rány a průsaku sekundárního krytí nebo pokynů ošetřujícího.

ČÍLOVÁ SKUPINA A OMEZENÍ POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro dospělé pacienty.

Těhotenství a laktace: Z důvodu absence klinických studií spojených s použitím u těhotných a kojících žen je **HemaGel®** možný použít pouze po konzultaci s lékařem.

Použití u dětí: Z důvodu absence klinických studií spojených s použitím u dětí je **HemaGel®** možný použít pouze po konzultaci s lékařem.

V případě, že se vyskytne lehké kožní podráždění (např. lehké svědění nebo mírné pálení) u osob se zvýšenou citlivostí nebo po aplikaci na citlivá místa (např. okolo očí), přerušete léčbu a kontaktujte svého lékaře.

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí apod.) přerušete léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře. Chraňte před dětmi! Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí expirační doby uvedené na tubě. Nepoužitý prostředek nebo prostředek s prošlou expirací vraťte do lékárny. Použití u dětí, těhotných a kojících se doporučuje po konzultaci s lékařem. Výrobek na ránu aplikujte nejdéle po dobu 30 dnů. Použití delší než 30 dnů konzultujte s lékařem. Po každém použití tubu pečlivě uzavřete.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C.

BALENÍ:

Tuba 5 g, 30 g, 100 g.

DISTRIBUTOR:

Targa Team a.s., Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6, Česká republika,
e-mail: info@targateam.cz, www.targateam.cz, www.hemagel.cz.

VÝROBCE:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika,
www.vhpharma.cz, www.hemagel.cz.

Datum poslední revize: 11. 3. 2022

INFORMÁCIE PRE POUŽITIE, ČÍTAJTE POZORNE!

HemaGel®

Zdravotnícka pomôčka



ÚČEL POUŽITIA:

Hydrofilný gél na ošetrovanie povrchových poranení kože.

PREČO POUŽÍVAŤ HemaGel® NA OŠETRENIE RÁN?

- chemicky viaže kyslíkové radikály, ktoré vznikajú v priebehu procesu hojenia rán
- kryje ranu pred sekundárnou infekciou zvonka
- na rane vytvára pružnú mechanickú ochrannú vrstvu
- vytvára vhodné prostredie pre granulácie, vrátane znižovania sekrécie

ZLOŽENIE:

HemaGel® je hydrofilný gél zložený z kopolyméru 2-hydroxyetylmetakrylátu, obsahujúceho polymérne viazané stéricky tienené amíny, makrogolu a čistej vody (aqua purificata). **HemaGel®** je vyvinutý Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied ČR.

AKO POSTUPOVAŤ PRI POUŽITÍ GÉLU:

- Očistíte ranu od mechanických nečistôt, napr. častí prachu, zvyškov predchádzajúcich liečebných materiálov, ktoré by mohli následne dráždiť a poškodzovať ranu.
- Rozotriete tenkú vrstvu gélu (cca 1 mm) po celej ploche spodiny rany s miernym presahom na zdravú pokožku. Gél prilne na spodinu rany a postupne absorbuje sekréty a ďalšie tekutiny z rany.
- Ránu prekryte neprijavým materiálom (napr. masťným tylom dostupným v lekární) a následne fixujte obvazom alebo gázovým štvorcem a náplastou. Drobné poranenia po nanosení gélu kryte náplastou s vankúšikom.
- Účinko gélu sa prejavuje napučaním. Unikátna technológia gélu zabraňuje prilepeniu na ranu a tým umožňuje aj veľmi ľahké odstránenie bez bolesti jemným zotretím alebo opláchnutím.
- Previazanie urobte podľa potreby po 12 - 48 hodinách. Vždy podľa stavu rany a presakovania sekundárnym krytím alebo podľa pokynov ošetrojúceho.

CIEĽOVÁ SKUPINA A OBMEDZENIE POUŽITIA:

Výrobok je určený pre dospelých pacientov.

Tehotenstvo a laktácia: Z dôvodu absencie klinických štúdií spojených s používaním u tehotných a dojčiacich žien je **HemaGel®** možný použiť len po konzultácii s lekárom.

Použitie u detí: Z dôvodu absencie klinických štúdií spojených s použitím u detí je **HemaGel®** možný použiť len po konzultácii s lekárom.

V prípade mierneho podráždenia kože (napr. mierne svrbenie alebo mierne horenie) u osôb so zvýšenou citlivosťou alebo po aplikácii v citlivých oblastiach (napr. okolo očí) zastavte liečbu a obráťte sa na svojho lekára.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu vedľajších nežiadúcich účinkov (zvýšená bolesť, začervenanie a pod.) prerušte liečbu a kontaktujte ošetrojúceho lekára. Chráňte pred deťmi! Len na vonkajšie použitie. Nepoužívajte vnútorne! Nepoužívajte po uplynutí expiračnej doby uvedenej na tube. Nepoužitý prostriedok alebo prostriedok s uplynulou expiráciou vráťte do lekárne. Použitie u detí, tehotných a dojčiacich sa odporúča po konzultácii s lekárom. Výrobok na ranu aplikujte najdlhšie po dobu 30 dní. Použitie dlhšie ako 30 dní konzultujte s lekárom. Po každom použití tubu starostlivo uzatvorte.

SKLADOVANIE:

Skladujte v suchu pri teplote 15-25 °C.

BALENIE:

Tuba 5 g, 30 g, 100 g.

DISTRIBÚTOR:

Targa Team a.s., Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6, Česká republika,
e-mail: info@targateam.cz, www.targateam.cz, www.hemagel.cz.

VÝROBCA:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika,
www.vhpharma.cz, www.hemagel.cz.

Dátum poslednej revízie: 11. 3. 2022