

INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

Hydrofilní gel.
By VH Pharma a.s.

HemaGel[®]

NEW



ÚČEL POUŽITÍ:

HemaGel[®] NEW je hydrogel obsahující polymerní síť určený pro hojení jednak akutních ran jako jsou povrchová poranění včetně popálenin I. a II. stupně a pooperační rány, ale také chronických ran typu bérčové vředy, proleženiny a kožní defekty u pacientů s diabetem.

JAK PŘÍSPÍVÁ HEMAGEL[®] NEW K OŠETŘENÍ RAN?

- chemicky váže kyslíkové radikály, které vznikají v průběhu procesu hojení ran
- kryje ránu před sekundární infekcí z venčí
- optimalizuje bakteriální osídlení rány
- utváří na ráně pružnou mechanickou ochrannou vrstvu
- podporuje proces hojení rány

SLOŽENÍ:

HemaGel[®] NEW je hydrofilní gel obsahující patentově chráněný polymer IPN, který má ve své struktuře polymerně vázané stericky stíněné aminy. Další složky jsou Macrogol 300 a čištěná voda. **HemaGel[®] NEW** je vyvinutý Ústavem Makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

POKYNY PRO POUŽITÍ A APLIKACI:

- Očistěte ránu od mechanických nečistot, např. částec prachu, zbytků předchozích léčebných materiálů, které by mohly následně dráždit a poškozovat ránu.
- Rozetřete tenkou vrstvu gelu (cca 1 mm) po celé ploše spodiny rány s mírným přesahem na zdravou pokožku. Gel přilne na spodinu rány a postupně absorbuje sekrety a další tekutiny z rány.
- Ránu překryjte nesavým materiálem (např. mastným tylem dostupným v lékárně) a následně fixujte obinadlem nebo gázovým čtvercem a náplastí. Drobná poranění po nanesení gelu kryjte polštářovou náplastí.
- Při převazu opláchněte jemně zbytky gelu a nečistoty z rány proudem vody a poté ránu osušte a opět naneste tenký film gelu.
- Přebaz provádějte dle potřeby po 12 - 48 hodinách. Vždy dle stavu rány a průsaku sekundárního krytí nebo pokynů ošetřujícího. U chronických ran se doporučuje co nejdelší interval mezi převazy.

CÍLOVÁ SKUPINA A OMEZENÍ POUŽITÍ:

Výrobek je určen pro všechny skupiny pacientů s akutní nebo chronickou ránou.

UPOZORNĚNÍ:

V případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků (zvýšená bolestivost, zarudnutí apod.) přerušte léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře. Chraňte před dětmi! Pouze pro vnější použití. Nepoužívejte vnitřně! Nepoužívejte po uplynutí expirační doby uvedené na tubě. Nepoužitý prostředek nebo prostředek s prošlou expirací vraťte do lékárny. Použití u dětí, těhotných a kojících se doporučuje po konzultaci s lékařem. Po každém použití tubu pečlivě uzavřete.

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchu při teplotě 15-25 °C.

BALENÍ:

Tube 5 g, 30 g, 100 g.

DISTRIBUTOR:

Targa Team a.s., Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: info@targateam.cz, www.targateam.cz, www.hemagel.cz.

VÝROBCE:

■ VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, www.vhpharma.cz, www.hemagel.cz.

Datum poslední revize: 8. 4. 2022

INFORMÁCIE NA POUŽITIE, ČÍTAJTE POZORNE!

Hydrofilný gél.
By VH Pharma a.s.

HemaGel® NEW



ÚČEL POUŽITIA:

HemaGel® NEW je hydrogél obsahujúci polymérnu sieť určený na hojenie nielen akútnych rán, ako sú povrchové poranenia vrátane popálenín I. a II. stupňa a pooperačné rany, ale tiež chronických rán typu vredy predkolenia, preležaniny a kožné defekty u pacientov s diabetom.

AKO PRISPIEVA HEMAGEL® NEW K OŠETRENIU RÁN?

- chemicky viaže kyslíkové radikály, ktoré vznikajú v priebehu procesu hojenia rán
- kryje ranu pred sekundárnou infekciou zvonku
- optimalizuje bakteriálne osídlenie rany
- vytvára na rane pružnú mechanickú ochrannú vrstvu
- podporuje proces hojenia rany

ZLOŽENIE:

HemaGel® NEW je hydrofilný gél obsahujúci patentovo chránený polymér IPN, ktorý má vo svojej štruktúre polymérne viazané stéricky tienené amíny. Ďalšie zložky sú Macrogol 300 a čistená voda. **HemaGel® NEW** je vyvinutý Ústavom makromolekulárnej chémie Akadémie vied ČR.

POKYNY NA POUŽITIE A APLIKÁCIU:

- Očistite ranu od mechanických nečistôt, napr. častíc prachu, zvyškov predchádzajúcich liečebných materiálov, ktoré by mohli následne dráždiť a poškodzovať ranu.
- Rozotrite tenkú vrstvu gélu (cca 1 mm) po celej ploche spodiny rany s miernym presahom na zdravú pokožku. Gél prilne na spodinu rany a postupne absorbuje sekréty a ďalšie tekutiny z rany.
- Ranu prekryte nenasiakavým materiálom (napr. masným tylom dostupným v lekárni) a následne fixujte ovínadlom alebo gázovým štvorcem a náplastou. Drobné poranenia po nanosení gélu kryte vankúšovou náplastou.
- Pri preváze jemne opláchnite zvyšky gélu a nečistoty z rany prúdom vody a potom ranu osušte a opäť naneste tenký film gélu.
- Preváz robte podľa potreby po 12 – 48 hodinách. Vždy podľa stavu rany a priesaku sekundárneho krytia alebo pokynov ošetrojúceho. Pri chronických ranách sa odporúča čo najdlhší interval medzi prevázmi.

CIEĽOVÁ SKUPINA A OBMEDZENIE POUŽITIA:

Výrobok je určený pre všetky skupiny pacientov s akútnou alebo chronickou ranou.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu vedľajších nežiaducich účinkov (zvyšená bolesť, začervenanie a pod.) prerušte liečbu a kontaktujte ošetrojúceho lekára. Chráňte pred deťmi! Iba na vonkajšie použitie. Nepoužívajte vnútorne! Nepoužívajte po uplynutí expiračnej lehoty uvedenej na tube. Nepoužitý prostriedok alebo prostriedok po expirácii vráťte do lekárne. Použitie u detí, tehotných a dojčiacich sa odporúča po konzultácii s lekárom. Po každom použití tubu starostlivo uzavrite.

SKLADOVANIE:

Skladujte v suchu pri teplote 15 – 25 °C.

BALENIE:

Tuba 5 g, 30 g, 100 g.

DISTRIBÚTOR:

Targa Team a.s., Šlikova 287/20, 169 00 Praha 6, Česká republika, e-mail: info@targateam.cz, www.targateam.cz, www.hemagel.cz.

VÝROBCA:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Česká republika, www.vhpharma.cz, www.hemagel.cz.

Dátum poslednej revízie: 8. 4. 2022